

## <呼吸器>



- ・ 専用検体としてご提出ください。  
※ 専用容器以外での喀痰提出の場合は、冷蔵にて提出してください。

### 採取方法

1. 朝食や歯磨き前に喀痰を出してください。  
※ 口を綺麗にするため2～3回口をすすいでください。
2. 容器の外蓋を開けて、内シールを全部剥がして捨ててください。
3. 深呼吸をし、強くせきをして喀痰を容器に入れてください。  
※ 喀痰はティッシュに包まずに提出してください。
4. 喀痰を入れた後は、外蓋をしっかりと閉め、20回以上容器を強く振ってください。
5. 3日間の喀痰を入れる場合は、ラベルの青線を超えないようにしてください。