


尿検体の採取方法(採取容器A79)


尿検体の採り方

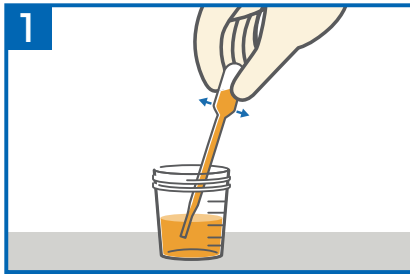


尿検体の採取

容器に初尿を採取します。スポイトを用いて、初尿をコバスPCRメディアに移します。

注意 初尿は採取後2~30℃で24時間以内にPCRメディアに移してください。
最後の排尿から少なくとも1時間以上経過後の初尿を採取してください。

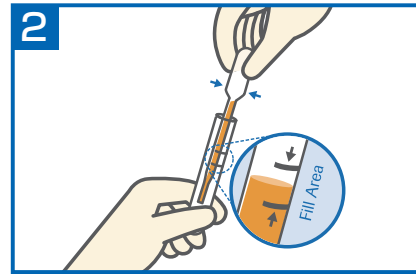


コバスPCRメディアに記載されている2つのラインの間に収まるように初尿を加えてください。

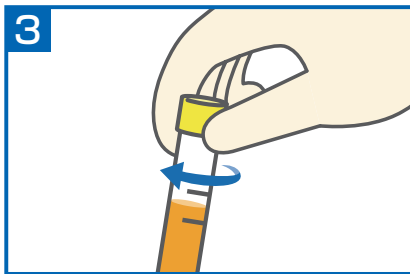

尿検体の保存

コバスPCRメディアの蓋をしっかりと閉めてください。

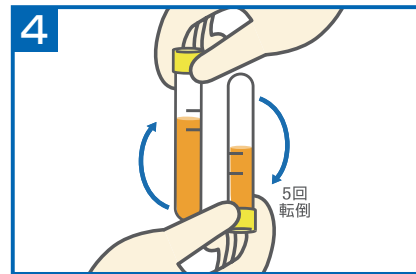

コバスPCRメディアを5回転倒混和させてください。